

YOSHIDA

シミるを防いで

Yoshida Group

120th

# 快適

ホワイトニング前後のケアはコレ！

\ 塗っとこ /

## デンティンキャンペーン

4.21 TUE - 7.17 FRI

知覚過敏抑制材料  
フオース デンティン

40mL 製品 1 セットで数回以上使用可能！

(※全歯にラバーカップで塗布した場合)

全歯一気に  
塗り広げ！

- ✔ ホワイトニング効果そのまま
- ✔ 防湿不要
- ✔ ラバーカップで塗布

塗っとこデンティンキャンペーン価格

40mL(20mL×2)	円	10mL(5mL×2)	円
--------------	---	-------------	---

標準価格：40mL(20mL×2) 9,500円(税別) / 10mL(5mL×2) 4,000円(税別)



# 使用方法

※症状の程度により、繰り返しの塗布を推奨しています。

※A液、B液を交互に塗る「個別塗布法」でもご使用いただけます。詳しくは添付文書、または製品カタログをご覧ください。

## 混和塗布法

※操作時間：15分以内を想定

A液・B液を  
同量ずつ混ぜる



練和時間目安：10～20秒

歯面清掃後の患部に  
こすり塗りする



塗布時間目安：5～20秒

綿球などで拭き取り、  
または洗浄する



- A・Bを混和してから塗布
- こすり塗り
- ラバーカップでの塗布
- 治療後すぐの飲食

- 光照射不要
- 塗布前の歯面乾燥不要

## ラバーカップ

手早く広範囲に  
しっかりとすりこむには、  
ラバーカップ等での  
塗り広げも有効です。



使用方法を動画でチェック！



混和塗布時




基本使用方法



ラバーカップ  
使用時

# 象牙細管の封鎖性と耐久性

微細な炭酸カルシウムが象牙細管内奥深くで石灰化し、歯と同じ主成分のリン酸カルシウムが形成・膨張するためブラッシングやうがいでも取れにくいことが期待できます。また、石灰化に有利な弱アルカリ性であるため歯に優しい製品となっています。

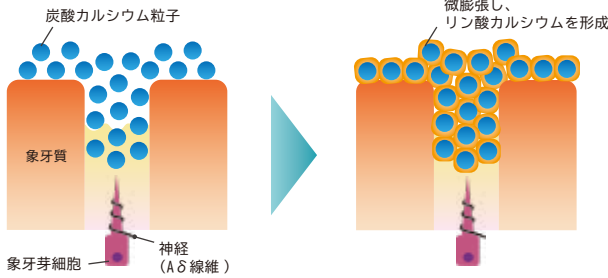


※象牙質断面図イメージ

## 象牙細管断面図




象牙細管の奥まで入り込み、  
象牙質との境目がわかりにくい  
ほど緊密に封鎖します。

※塗布・写真撮影：大阪歯科大学口腔病理学講座  
※牛歯 / 5,000倍 SEM 画像

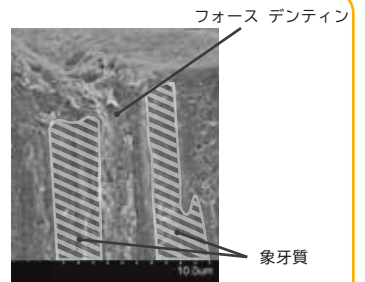

ブラッシングやうがい、  
スクレーピングでも取れにくい

〈測定条件〉牛歯を使用した実験データ  
※臨床で使用する際は、経過日数や口腔内の状況によって  
個人差が生じます。  
(塗布・写真撮影：大阪歯科大学口腔病理学講座)

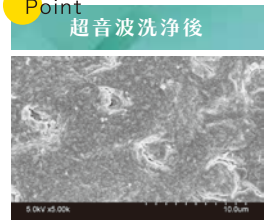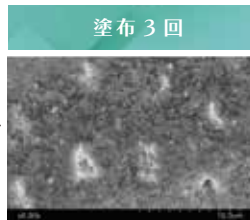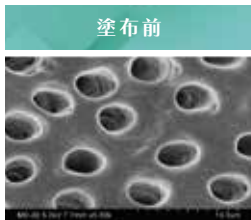

※牛歯 / ブラッシング20回・水洗30秒 ※超音波洗浄2分間  
(ブラッシングは1往復のストロークで1回とし、水洗時の水温は37度を条件)

# 生体適合性

生体適合性があるという論文が発表されました。


フォース デンティンを添加した培地で  
歯髄や歯周組織の細胞の培養を14日間の培養を行い、  
生/死細胞染色を行ったところ、  
生細胞(緑色)のみが観察されました。

引用文献：Sealing Property of Dentin Tubules by A New Hypersensitivity  
Control Material and Its Effect on Human Cultured Cells  
(写真提供：大阪歯科大学口腔病理学講座)

Point  
お口に優しい



(ヒト乳歯由来歯髄線維芽細胞)

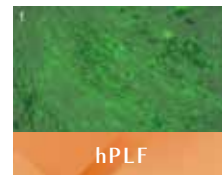

(ヒト歯根膜線維芽細胞)



(ヒト骨芽細胞)

コードNo.	商品名	注文数
445089	フォースデンティン 40mL (20mL×2)	
445096	フォースデンティン 10mL (5mL×2)	

## フォースデンティンキャンペーンご注文書

一般名称：歯科用知覚過敏抑制材料(歯科用シーリング・コーティング材料)  
販売名：フォース デンティン 認証番号：305AGBZX00005000(管理)  
製造販売元：株式会社メディボ TEL：06-6673-5756

貴歯科医院名・芳名	お取引歯科ディーラー名
ご住所	
TEL ( ) ( )	FAX ( ) ( )

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

〈販売元〉株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ：0800-170-5541



(01)02747937024195  
C02848/2026年5月/①/改